



**Antistatische Inhalierhilfe  
mit Mundstück für Kinder ab 5 Jahren**



Die **AC\*Boyz\*** Inhalierhilfe wird mit einem Dosieraerosol verwendet, um Dir zu helfen, besser atmen zu können. Weitere Informationen sowie Videoanimationen findest Du unter [www.aerochamber.hexal.de](http://www.aerochamber.hexal.de)

**GEBRAUCHSINFORMATION**

Die **AC\*Boyz\*** Inhalierhilfe ermöglicht die einfache und sichere Inhalation mit einem von Deinem Arzt verordneten Dosieraerosol.

Das Aerosol wird in die antistatische Kammer der **AC\*Boyz\*** Inhalierhilfe abgegeben und kann von dort problemlos inhaliert werden, ohne dass die Atmung und das Auslösen des Dosieraerosols koordiniert werden müssen. Die Inhalierhilfe ist zur Benutzung für ein- und denselben Patienten gedacht.

**Wie verwende ich meine Inhalierhilfe?**

Vor Gebrauch ist sicherzustellen, dass diese Gebrauchsinformation und die dem Dosieraerosol beiliegende Gebrauchsinformation gelesen werden.

<p><b>1</b></p> <p>Die Inhalierhilfe vor dem Gebrauch sorgfältig überprüfen, ob diese ordnungsgemäß zusammengebaut wurde, Teile fehlen oder beschädigt sind. Wenn sie beschädigt ist, muss sie sofort ausgewechselt werden.</p>	<p><b>2</b></p> <p>Die Schutzkappen vom Dosieraerosol und der Inhalierhilfe abnehmen.</p>	<p><b>3</b></p> <p>Das Dosieraerosol unmittelbar vor Gebrauch gemäß seiner beiliegenden Gebrauchsinformation schütteln. Das Dosieraerosol in die Rückseite der Inhalierhilfe einsetzen.</p>	<p><b>4</b></p> <p>Das Mundstück in den Mund nehmen und mit den Lippen umschließen, um eine effektive Abdichtung herzustellen. Der <b>Flow-Vu*</b>-Indikator bewegt sich nur, wenn eine gute Abdichtung hergestellt ist. Wenn der Patient einatmet, sollte sich der farbige Atemstrom-Indikator in Richtung Patient bewegen.</p>	<p><b>5</b></p> <p>Sanft ausatmen und das Dosieraerosol zu Beginn einer langen Inhalation auslösen. Langsam und tief durch den Mund einatmen, bis ein voller Atemzug genommen wurde. Darauf achten, dass die Dosieranweisungen des Arztes befolgt werden und jeweils ein Sprühstoß ausgelöst wird. <b>LANGSAMER ATMEN</b>, wenn die <b>FlowSignal*</b>-Pfeife ertönt. Das Signal zeigt an, dass der Patient zu schnell atmet.</p>	<p><b>6</b></p> <p>Zur Wiederholung der Schritte 3–5 den Zeitraum einhalten, der in der Gebrauchsinformation des Dosieraerosols angegeben ist.</p> <p><b>TIPP:</b> Den Atem nach der ersten Inhalation nach Möglichkeit für 5–10 Sekunden anhalten. Alternativ 2–3 Mal durch die Inhalierhilfe atmen.</p>
---	---	---	--	---	---

**REINIGUNGSANLEITUNG**

Die **AC\*Boyz\*** Inhalierhilfe sollte wöchentlich gereinigt werden

<p><b>1</b></p> <p>Rückteil Vorderteil</p> <p>Das Rückteil abnehmen. Um das Vorderteil zu entfernen, die Inhalierhilfe wie oben gezeigt drehen. Die Kappe des Mundstücks abnehmen.</p>	<p><b>2</b></p> <p>Alle Teile 15 Minuten lang in eine milde Lösung aus Geschirrspülmittel und lauwarmem sauberen Wasser einweichen. Behutsam hin- und herbewegen. Mit sauberem Wasser abspülen.</p>	<p><b>3</b></p> <p>Die Teile in den oberen Einsatz der Geschirrspülmaschine legen. Sicherstellen, dass die einzelnen Teile in vertikaler Stellung platziert sind (siehe Abbildung). Nach der Reinigung aus der Geschirrspülmaschine nehmen.</p>	<p><b>4</b></p> <p>Überschüssiges Wasser abschütteln und die Teile in vertikaler Stellung an der Luft trocknen lassen. Vor dem erneuten Zusammenbau darauf achten, dass alle Teile trocken sind.</p>	<p><b>5</b></p> <p>Beim Zusammenbau das Vorderteil am Ende der Kammer anbringen und drehen, bis es in seiner Position verriegelt ist. Die Schutzkappe sollte immer auf dem Mundstück sein, wenn die <b>AC*Boyz*</b> nicht in Gebrauch ist.</p>	<p><b>5</b></p> <p>Ausrichtungsmarkierung Flow-Vu*-Indikator</p> <p>Die Ausrichtungsmarkierung auf dem Rückteil wie abgebildet mit dem <b>Flow-Vu*</b>-Indikator ausrichten. Fest drücken, um einen guten Sitz des Rückteils zu gewährleisten.</p>
--	---	---	--	--	--



**Hinweis:**

- Lesen Sie die dem Dosieraerosol beiliegende Gebrauchsinformation sorgfältig und befolgen Sie diese.
- Enthält kein Bisphenol A (BPA), Phthalat, Blei oder PVC.
- Die **AC\*Boyz\*** sollte nach durchgehender 12-monatiger Verwendung durch eine neue ersetzt werden.
- Bei einer Ansammlung von Medikamenten in der Kammer diese mit einem weichen Tuch säubern.
- Bei der Reinigung in der Geschirrspülmaschine einen Klarspüler verwenden. Das Spülen mit stark verschmutztem Geschirr wird nicht empfohlen. Bis zu 70 °C spülmaschinenfest.
- Wenn Sie Fragen zur Funktionsweise oder Verwendbarkeit der **AC\*Boyz\*** haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Achtung: Kinder nicht unbeaufsichtigt mit der **AC\*Boyz\*** Inhalierhilfe lassen.

Enthält kein Latex

Charginbezeichnung



Trudell Medical International\*  
725 Third Street, London, Ontario,  
Canada N5V 5G4  
customer.service@trudellmed.com  
+1-519-455-7060  
www.trudellmed.com

Trudell Medical International Europe Limited  
BioCity Nottingham, Pennyfoot Street,  
Nottingham, United Kingdom NG1 1GF

Alleinvertrieb Deutschland  
**HEXAL AG**  
Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen  
☎ (08024) 908-0  
☎ (08024) 908-1290  
✉ service@hexal.com