

Aerosolbehandlung und Ihr Hund



Die **AeroDawg*** Aerosolvorschaltkammer für Hunde wurde von Trudell Medical International zur Verwendung in Verbindung mit einem **Inhaliergerät** zur Verabreichung von Aerosolmedikation an Ihren Hund entwickelt.

Die primäre Behandlung von chronischer Bronchitis basiert darauf, die Atemwegsentzündung unter Kontrolle zu bekommen.^{1,2} Die Verabreichung von Aerosolmedikation über Aerosoldosier- oder **Inhaliergeräte** wird bereits seit 1960 zur Behandlung von Atemwegserkrankungen beim Menschen eingesetzt. Da Atemwegserkrankungen des Hundes ähnlich sind wie beim Menschen, können sie auch auf ähnliche Art und Weise behandelt werden. Da normale **Inhaliergeräte** jedoch eine Dosis mit mehr als 100 km/h abgeben, ist eine effektive Verabreichung der Medikation an Hunde ohne eine Aerosolkammer sehr schwierig.

Wenn die **AeroDawg*** Aerosolvorschaltkammer für Hunde an das **Inhaliergerät** angeschlossen ist, kann Ihr Hund normal atmen und die Aerosolmedikation inhalieren, damit das Medikament tief in die Lungen des Hundes eindringen kann, um dort seine Wirkung entfalten zu können. Ohne die **AeroDawg*** Aerosolvorschaltkammer für Hunde kann Ihr Hund die Medikation nicht vollständig nutzen, da der größte Teil nur in den Mund oder Hals gelangt.



Trudell Medical International


Trudell Medical International entwickelt und produziert Verabreichungsgeräte für pharmazeutische Aerosolmedikamente für Menschen und Tiere. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Produkte von unübertroffener Qualität zur Behandlung von Atemwegserkrankungen zu liefern.

Mehr über die Wissenschaft der Aerosole finden Sie auf unserer Website unter


www.aerodawg.com

Gebrauchsanleitung:

Vollständige Anleitungen sind der Packungsbeilage zu entnehmen.

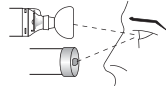


Untersuchen Sie alles auf Fremdkörper und versichern Sie sich, dass alle Teile intakt sind.

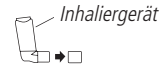


Entfernen Sie die Verschlusskappe vom **Inhaliergerät**.




Setzen Sie das **Inhaliergerät** in die Rückseite der **AeroDawg*** Aerosolvorschaltkammer für Hunde ein und schütteln Sie beides.

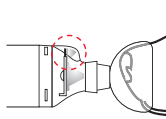

Setzen Sie die Maske vorsichtig auf die Schnauze und stellen Sie sicher, dass sie vollständig mit ihr abschließt. Während der Hund inhaliert, sollte der **Flow-Vu*** Indikator sich unregelmäßig bewegen oder sich auf Ihren Hund zubewegen. Wenn Ihr Hund dabei in Panik gerät, sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt. Der **Flow-Vu*** Indikator kehrt in die vertikale Position zurück, wenn der Hund die Inhalation stoppt oder ausatmet.

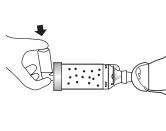

Drücken Sie das **Inhaliergerät** und halten Sie die Maske für 3-5 Atemzüge auf der Schnauze. Bewahren Sie eine effektive Abdichtung und verwenden Sie den **Flow-Vu*** Indikator, um die Anzahl der Atemzüge zu zählen. Stellen Sie sicher, dass die Dosierungsanweisungen des Tierarztes eingehalten werden und dass immer nur jeweils ein Medikamentenhub abgegeben wird.

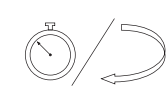

Befolgen Sie die Anleitungen für das **Inhaliergerät** hinsichtlich der Wartezeit, bevor Sie die Schritte 3-5 wie vorgeschrieben wiederholen.

Vertrieb:



Hersteller:

Trudell Medical International

725 Third Street, London, Ontario, Kanada, N5V 5G4
Telefon: +1-519-455-7060 Fax: +1-519-455-7858
Gebührenfrei innerhalb von Nordamerika: 1-800-465-3296
E-Mail: aerodawg@trudellmed.com

MD-7718-0408. * Marken und eingetragene Marken von Trudell Medical International. Copyright © Trudell Medical International 2007, 2010. Alle Rechte vorbehalten.

¹ Padrid PA. „Diagnosis and Therapy of Canine Chronic Bronchitis“. In: Bonagura, JD, Kirk RW eds. Kirk's Current Veterinary Therapy XII. Saunders Co Philadelphia 1995, S. 908-915

² McKiernan BC. „Diagnosis and Treatment of Canine Chronic Bronchitis“. In: Padrid PA ed. Vet Clin N Amer 2000. Saunders Co Phila PA S. 1267-1279

³ Newman S. „Principles of Metered-Dose Inhaler Design“ Respir Care 2005; 50 (9): 1177-1188

AeroDawg*

Aerosolvorschaltkammer für Hunde

AEROSOLMEDIKAMENTENVERABREICHUNG

für

CHRONISCHE BRONCHITIS DES HUNDES



AeroDawg*

Aerosolvorschaltkammer für Hunde

www.aerodawg.com

Leidet Ihr Hund unter chronischer Bronchitis?

Chronische Bronchitis bei Hunden wird durch eine Entzündung der Atemwege verursacht, was zu chronischem Husten und Belastungsintoleranz führt. Häufige Anzeichen für chronische Bronchitis umfassen Husten, Würgen oder Schlucken nach dem Husten, Atemschwierigkeiten oder Keuchen für eine Dauer von 2-3 Monaten oder länger.

Chronische Bronchitis ist eine der häufigsten Atemwegserkrankungen bei Hunden^{1,2}, sie ist jedoch schwierig zu diagnostizieren, da sie mit vielen anderen Krankheiten verwechselt werden kann. Hunde, die unter einer chronischen Bronchialinfektion leiden, sind oft empfindlich gegenüber Umwelt- und Haushaltsallergenen.



Der **Flow-Vu*** Indikator auf der **AeroDawg*** Aerosolvorschaltkammer für Hunde

Der **Flow-Vu*** Indikator gibt Ihnen die Gewissheit, dass Ihr Hund die erforderliche Medikation erhält. Der **Flow-Vu*** Indikator auf der **AeroDawg*** Aerosolvorschaltkammer für Hunde hilft Ihnen dabei, zu zählen, wie viele Atemzüge Ihr Hund gemacht hat und sicherzustellen, dass die Maske fest mit der Schnauze abschließt. Beides ist wichtig, damit das Aerosolmedikament in die tiefen Lungenareale Ihres Hundes gelangen kann.

Wenn der **Flow-Vu*** Indikator sich unregelmäßig bewegt oder sich auf Ihren Hund zubewegt, inhaliert der Hund – und Sie sollten den Inhalator drücken. Wenn die Inhalation stoppt, kehrt der **Flow-Vu*** Indikator wieder in die vertikale Position zurück. Diese erhöhte Kontrolle ermöglicht Ihnen eine bessere Behandlung der Atemwegserkrankung Ihres Hundes.



- Leicht zu verwenden und zu reinigen
- Reduziert die Risiken der mit Tabletten, Injektionen oder Sirup assoziierten Nebenwirkungen
- Ein einzigartiger bruchsicherer antistatischer Polymerkörper stellt sicher, dass die Medikation tief in die Lungen des Hundes geliefert wird
- Zwei Maskengrößen für Hunde jeder Rasse und Größe
- Ein Exhalationsventil lenkt die Luft vom Hund weg, um eine Reizung zu verhindern



Wo kann ich die **AeroDawg*** Aerosolvorschaltkammer für Hunde kaufen?

Viele Tierärzte verkaufen die **AeroDawg*** Aerosolvorschaltkammer für Hunde in ihrer Klinik, Sie können sie jedoch auch über unsere Website erhalten (www.aerodawg.com). Bitte sprechen Sie vor dem Kauf mit dem Tierarzt Ihres Hundes, um sich zu vergewissern, dass die **AeroDawg*** Aerosolvorschaltkammer für Hunde für den Zustand Ihres Hundes geeignet ist.



Wie funktioniert die **AeroDawg*** Aerosolvorschaltkammer für Hunde?

Die **AeroDawg*** Aerosolvorschaltkammer für Hunde enthält das Medikament, damit es von Ihrem Hund über mehrere Atemzüge hinweg eingeatmet werden kann. Außerdem trennt die Kammer die groben Aerosolpartikel (die sich meist in Mund und Nase ablagern), so dass die feineren, wirksameren Partikel tief in die Lungen vordringen können, wo sie gebraucht werden.



Welche Medikamente können mit der **AeroDawg*** Aerosolvorschaltkammer für Hunde verwendet werden?

Die **AeroDawg*** Aerosolvorschaltkammer für Hunde ist für den Gebrauch mit Inhalationsmedikamenten vorgesehen. Ihr Tierarzt bestimmt, welches Medikament für Ihren Hund geeignet ist.



Warum sollte ich dieses Gerät herkömmlichen oralen Steroiden vorziehen?

Das Herabsetzen von oralen Steroiden über einen Zeitraum von zwei Wochen und der Übergang zu inhalierten Steroiden kann eine Reduzierung der Medikation ermöglichen und eine kosteneffektive Therapie mit wahrscheinlich weniger Nebenwirkungen ermöglichen. Inhalierte Corticosteroide sind die wirksamsten Medikamente, die zur Behandlung von Hunden mit chronischer Bronchitis zur Verfügung stehen und sollten als Hauptbestandteil der chronischen Therapie betrachtet werden.



Gibt es einen Grund, warum mein Hund die **AeroDawg*** Aerosolvorschaltkammer für Hunde nicht verwenden sollte?

Dieses Gerät ist zwar relativ neu, aber wir sind uns keiner Gründe bewusst, aus denen die **AeroDawg*** Aerosolvorschaltkammer für Hunde nicht zur Behandlung von chronischer Bronchitis beim Hund eingesetzt werden könnte, es sei denn, es bestehen Kontraindikationen für bestimmte Medikamente. Das Prinzip der **AeroDawg*** Aerosolvorschaltkammer für Hunde basiert auf der Verabreichung von Aerosolmedikamenten, wie sie derzeit bei Menschen, Pferden und Katzen verwendet wird. Das Produkt sollte nur auf Empfehlung eines Tierarztes verwendet werden.